

PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG



Jl. SAPTA MARGA BLOK B, RT.10 RW.03, GUNTUNG PAYUNG, LANDASAN ULIN, KOTA
BANJARBARU 70721 05116748388

Pemerintah Kota Banjar Baru / PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG

Pemeriksaan Duh Tubuh (sekret genital)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Rujukan Pemeriksaan Duh Tubuh (sekret genital) dari dokter / Petugas Kes. Puskesmas Guntung Payung.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG



Jl. SAPTA MARGA BLOK B, RT.10 RW.03, GUNTUNG PAYUNG, LANDASAN ULIN, KOTA
BANJARBARU 70721 05116748388

Pemerintah Kota Banjar Baru / PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG

1. Datang ke Puskesmas Guntung Payung dengan membawa data-data diri misal ; KTP dan KK atau Kartu Pasien (bila sudah terdaftar).
2. Ambil antrian di Loker, tunggu hingga dipanggil petugas.
3. Petugas loket memberikan berkas status ke pasien dan dibawa oleh pasien ke ruang Poli Umum (dokter) atau Yang lain sesuai arahan petugas.
4. Apabila dari dokter / Petugas Kes. Yang lain memerlukan pemeriksaan Duh Tubuh (sekret genital) berdasarkan diagnosa dan persaratan), maka dokter memberikan lembar rujukan pemeriksaan Duh Tubuh (sekret genital) ke pasien untuk dibawa ke Laboratorium, (namun jika tidak diperlukan dalam diagnosa/persaratan, maka dokter tidak memberikan rujukan pemeriksaan Duh Tubuh (sekret genital) pada pasien)
5. Berdasarkan lembar rujukan dari dokter tadi, maka petugas laboratorium memeriksa Duh Tubuh (sekret genital) pada pasien, dengan cara ;
 1. PERSIAPAN PEMERIKSAAN a. Pasien dalam pengobatan, obat perlu dihentikan sehari sebelum pengambilan spesimen b. Pengambilan sebaiknya diambil pada pagi hari sebelum buang air kecil c. Pada wanita spesimen sebaiknya diambil sebelum atau sesudah haid d. Beri label pada slide sesuai data pasien
 2. PELAKSANAAN ANALISA
 - 1) Prosedur Pembuatan Sediaan a. Untuk pasien laki-laki bersihkan lubang kemaluan dengan kapas lidi yang dibasahi dengan larutan salin b. Dengan tekanan yang ringan pada alat kemaluan dari bagian pangkal ke arah ujung (belakang ke depan) c. Sekret yang didapat dioleskan pada kaca objek d. Untuk pasien wanita, berbaring terlentang dengan kedua lutut ditekuk pada kursi obstetrik e. Masukkan spekulum steril dengan hati-hati dan spekulum dibuka f. Masukkan ujung kapas lidi dan oleskan pada daerah endocervix,gerakkan kapas lidi melingkar ke kanan dan diamkan beberapa saat untuk penyerapan g. Sekret yang di dapat di oleskan pada kaca objek h. Keringkan sediaan ,setelah kering fiksasi dengan melakukan di atas nyala api lampu spritus 2) Pewarnaan sediaan menggunakan Methylen Blue
 1. sediaan diwarnai dengan Methylen Blue selama 1 menit, cuci dengan air mengalir
 2. Keringkan pada suhu kamar dan periksa dibawah mikroskop dengan objektif 100x.
 3. PENCATATAN DAN PELAPORAN HASIL ANALISA a. Masukkan hasil analisa pemeriksaan pada register laboratorium dan blanko hasil laboratorium Serahkan hasil pemeriksaan laboratorium pada masing penderita dalam keadaan tertutup 7) Sediaan dicuci dengan air mengalir; 8) Tuangkan larutan Methylen Blue 0,3% diatas sediaan dan biarkan selama 10-20 detik atau larutan Methylen blue 0,1% selama 1 menit; 9) Sediaan dicuci dengan air mengalir dan keringkan pada suhu kamar; 10) Setelah kering periksa di bawah Mikroskop dengan lensa objektif 100x pada 100 lapang pandang. 3. Pencatatan dan Pelaporan Hasil Analisa; a. Masukkan hasil analisa pemeriksaan pada register laboratorium dan hasil pemeriksaan laboratorium; b. Registrasi pada form Tb 04; c. Serahkan hasil pemeriksaan laboratorium pada masing penderita dalam keadaan tertutup.
 6. Hasil pemeriksaan Duh Tubuh (sekret genital) tadi dibawa kembali oleh pasien ke ruang dokter atau yang lain sesuai arahan petugas.

PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG



Jl. SAPTA MARGA BLOK B, RT.10 RW.03, GUNTUNG PAYUNG, LANDASAN ULIN, KOTA
BANJARBARU 70721 05116748388

Pemerintah Kota Banjar Baru / PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Laboratorium

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Email : puskesmasguntungpayung@gmail.com
3. No. Telp : 0511 6748388