



UPTD Puskesmas Kiliran Jao

Jl. Lintas Sumatera Komplek Kantor Walinagari Muaro Takung 27572 075421101

www.disperta.sijunjung.go.id

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Pertanian / UPTD Puskesmas Kiliran Jao

Pemeriksaan sampel ulas darah

No. SK :

Persyaratan

1. Berdomisili di wilayah binaan Puskesmas Kiliran Jao
2. Sampel Darah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyiapkan peralatan dan bahan.
2. Meneteskan darah pada kaca objek, kira-kira 1-2 cm dari salah satu ujungnya dengan diameter 1 mm.
3. Memegang kaca objek yang lain sebagai perata. Kaca tersebut dipegang membentuk sudut 30-40° dengan kaca sediaan. Diletakkan di depan tetesan darah tadi lalu diundurkan sepanjang sisi
4. garis temu kedua kaca objek, kemudian kaca perata di dorong sepanjang kaca sediaan dengan gerakan cepat, tetap/tidak ragu/tidak kaku.
5. Memfiksasi preparat ulas darah.
6. Mewarnai preparat ulas darah.
7. Mencuci preparat dengan air bersih dan diangin-anginkan.
8. Memeriksa di bawah mikroskop dengan pembesaran 1000x.

Waktu Penyelesaian



UPTD Puskesmas Kiliran Jao

Jl. Lintas Sumatera Komplek Kantor Walinagari Muaro Takung 27572 075421101

www.disperta.sijunjung.go.id

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Pertanian / UPTD Puskesmas Kiliran Jao

2 Hari

Menyiapkan peralatan dan bahan.

Meneteskan darah pada kaca objek, kira-kira 1-2 cm dari salah satu ujungnya dengan diameter 1 mm.

Memegang kaca objek yang lain sebagai perata. Kaca tersebut dipegang membentuk sudut 30-40° dengan kaca sediaan. Diletakkan di depan tetesan darah tadi lalu diundurkan sepanjang sisi

garis temu kedua kaca objek, kemudian kaca perata di dorong sepanjang kaca sediaan dengan gerakan cepat, tetap/tidak ragu/tidak kaku.

Memfiksasi preparat ulas darah.

Mewarnai preparat ulas darah.

Mencuci preparat dengan air bersih dan diangin-anginkan.

Memeriksa di bawah mikroskop dengan pembesaran 1000x.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan laboratorium tipe C

Pengaduan Layanan

081263115526