



## UPTD Puskesmas Tembuku II

Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Bangli 80671

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli / UPTD  
Puskesmas Tembuku II

# Pemeriksaan HIV tes Rapid

No. SK :

## Persyaratan

1. membawa fotocopy KTP
2. membawa Fotocopy KK
3. Membawa kartu KIS

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Cara Kerja :
  - a. Reagen SD Bioline HIV - Tempatkan reagen pada suhu kamar. - Keluarkan reagen dari bungkusnya, dan beri kode/penomoran sampel. - Teteskan 10 µl serum / plasma atau 20 µl darah vena pada lubang yang tersedia - Tambahkan buffer 4 tetes pada lubang yang sama - Tunggu dan baca hasil antara 10 - 20 menit
  - b. Reagen HIV Oncoprobe - Tempatkan reagen pada suhu kamar. - Keluarkan reagen dari bungkusnya, dan beri kode/penomoran sampel - Teteskan 25 µl serum / plasma atau 50 µl darah vena pada lubang yang tersedia - Pada lubang yang sama, Tambahkan 1 tetes buffer untuk specimen serum/ plasma dan 2 tetes buffer untuk spesiman darah vena - Tunggu dan baca hasil antara 5 – 30 menit.
  - c. Reagen HIV Vikia - Tempatkan reagen pada suhu kamar. - Keluarkan reagen dari bungkusnya, dan beri kode/penomoran sampel - Teteskan 75 µl serum / plasma/darah vena/darah kapiler pada lubang yg tersedia - Untuk specimen darah vena /darah kapiler tambahkan 1 tetes buffer pada lubang yang sama, untuk sampel serum/plasma tidak perlu penambahan buffer - Tunggu, dan baca hasil sebelum 30 menit
  - d. Reagen HIV Advanced (intec) - Tempatkan reagen pada suhu kamar. - Keluarkan reagen dari bungkusnya, dan beri kode/penomoran sampel - Teteskan 30 µl serum / plasma/darah vena pada lubang sample - Teteskan 1 tetes buffer pada lubang yg sama - Tunggu dan baca hasil setelah 15 menit
2. Interpretasi hasil :
  - Untuk reagen - SD Bioline - HIV Oncoprobe - HIV Advance(intec) • Non reaktif : Jika hanya terbentuk 1 garis pada area garis control ( C ) • Reaktif HIV 1 : Jika terbentuk 2 garis( C dan T 1) Reaktif HIV 2 : Jika terbentuk 2 garis( C dan T2) Reaktif HIV 1 dan 2 : Jika terbentuk 3 garis( C, T1 dan T2) • Hasil invalid : Jika tidak terbentuk garis pada control (C) - HIV VIKIA
  - Non Reaktif : Jika terbentuk 1 garis berwarna merah muda pada area control ( C ) • Reaktif : Jika terbentuk 2 garis, yaitu: 1 garis berwarna merah muda pada area control( C ) dan 1 garis berwarna biru pada area Tes ( T ) • Invalid : Jika hanya terbentuk 1 garis berwarna biru pada area control ( C ) atau terbentuk 2 garis berwarna biru pada area control( C ) dan tes ( T )

## Waktu Penyelesaian



## UPTD Puskesmas Tembuku II

Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Bangli 80671

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli / UPTD  
Puskesmas Tembuku II

45 Menit

Pelaksanaan Konseling dan informed Consen mengenai pemriksaan : 15 menit

Persiapan, pemeriksaan dan waktu pemeriksaan spesimen darah sampedakan keluar hasil : 30 menit

### Biaya / Tarif

5000

untuk pasine yang memiliki kartu KIS tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. 1. Konseling 2. test HIV

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui telp Puskesmas yang akan ditanggapi oleh tim penanganna keluhan dan kepuasan puskesmas