



RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

rsudambarawa.semarangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Standar Pelayanan CSSD

No. SK :

Persyaratan

1. Barang / Alat Instrumen dari IBS, Rawat Inap, Rawat Jalan dan Unit Penunjang yang telah digunakan pasien. 2.
2. Ada pemisahan barang / alat instrumen kotor infeksius dan non infeksius.
3. Diantar ke Ruang CSSD dengan kontainer plastik khusus.
4. Mengisi Formulir Permintaan Sterilisasi barang / alat instrumen.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

rsudambarawa.semarangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Image not found or type unknown



1. Petugas dari masing – masing unit menyerahkan barang / alat instrumen tidak steril.
2. Petugas dari masing – masing unit mengisi daftar barang / alat instrumen yang disetorkan ke CSSD.
3. Petugas CSSD menerima dan memisahkan barang / alat instrumen infeksius dan non infeksius untuk dimasukkan pada ruang Dekontaminasi.
4. Petugas CSSD mencuci tangan terlebih dahulu dan memakai APD lengkap (Topi, Masker, Kaca mata goggle, Handshoen, Aprone, Sandal Karet).
5. Petugas CSSD merendam alat instrumen pada larutan enzyomatik (15 menit alat instrumen non infeksius dan 30 menit alat instrumen infeksius). Kemudian dicuci, disikat, dan dibilas dengan air mengalir.
6. Petugas CSSD merendam alat instrumen pada larutan DTT (15 menit alat instrumen non infeksius dan 30 menit alat instrument infeksius). Kemudian dibilas dengan air mengalir, setelah itu dikeringkan dengan handuk halus.
7. Petugas CSSD melakukan setting, packing, pemasangan labeling dan indikator steril pada barang / alat instrument sesuai dengan unit yg mengirim.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 10 Jan 2025 pukul 05:09. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Petugas CSSD melepas APD dan meletakkannya ditempat sampah infeksius.

9. Petugas CSSD melakukan cek fungsi mesin sterilisasi / autoclave sesuai dengan temperature, tekanan,



RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

rsudambarawa.semarangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Waktu Penyelesaian

0
6 hari kerja (menyesuaikan kondisi ruangan) : Jaga pagi : 07.30 - 15.00 WIB.

Penyerahan barang / alat instrumen tidak steril :

1. Jam 08.00-13.00 WIB (IRI, IRJ, Unit Penunjang).
2. Untuk bagian IBS setelah program operasi selesai.

Pengambilan barang / alat instrument steril :

1. Jam 08.00-10.00 WIB (IRI, IRJ, Unit Penunjang).
2. Jam 18.00 WIB (IBS).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) tentang tarif retribusi yang berlaku

Produk Pelayanan

1. CSSD

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dilakukan melalui Tim Pengaduan

1. Email : ambarawa_rsud@yahoo.co.id
2. Website : rsgmambarawa.semarangkab.go.id
3. e-Pengaduan : https://s.id/pengaduan_RSGM
4. Telepon : (0298) 591020
5. Kotak Saran
6. Tim Pengaduan