



Rumah Sakit Umum Daerah Soppeng

Jalan Malaka Raya Kelurahan Lemba Watansoppeng 90811 048423307

<https://rsud.soppeng.go.id>

Pemerintah Kab. Soppeng / Rumah Sakit Umum Daerah Soppeng

CUTTERA XEO (Poliklinik kulit dan Kelamin)

No. SK :

Persyaratan

1. Suatu alat yang digunakan untuk tindakan permasalahan kulit diwajah dan badan, untuk membantu perawatan pada kulit dan pengobatan
2. Persiapan Blangko Rekam Medis (BRM)
3. SEP dari BPJS
4. Data pasien lain selain tidak terdaftar dari BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Persetujuan tindakan medik
2. Persiapan pasien, alat, petugas
3. Menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri
4. Meminta izin pasien untuk dilakukan tindakan cuttera xeo dan meminta pasien untuk tetap tenang
5. Memotret sebelum tindakan
6. Mempersiapkan pasien untuk berbaring di tempat tidur
7. Pendingin ruangan diatur ke suhu 16°C
8. Kabel mesin cuttera di colokkan ke stop kontak dinding, pastikan daya listrik cukup (3500 watt)
9. Tarik tuas ON di belakang mesin, lalu putar kunci mesin sesuai arah jarum jam hingga ada suara "kill"
10. Tunggu loading mesin kira-kira 30 detik
11. tampilan handpiece Er:YSGG dan Nd:YAG akan muncul, kemudian pilih handpiece yang akan digunakan
12. Jika dipilih Er:YSGG, muncul tampilan parameter fluence dan pattern yang akan digunakan, input parameter yang diinginkan
13. Jika dipilih Nd:YAG, muncul tampilan 3 parameter fluence, Pulse, Duration, dan Frequency, Input parameter yang diinginkan
14. Angkat handpiece yang akan digunakan kemudian tekan tombol kalibrasi
15. Tunggu sampai nada selesai berbunyi kemudian injak pedal untuk menembakkan laser

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Soppeng

Jalan Malaka Raya Kelurahan Lemba Watansoppeng 90811 048423307

<https://rsud.soppeng.go.id>

Pemerintah Kab. Soppeng / Rumah Sakit Umum Daerah Soppeng

90 Menit

60 - 90 menit

Biaya / Tarif

650

Produk Pelayanan

1. Membantu mengatasi masalah kulit seperti untuk peremajaan kulit, memperbaiki tekstur kulit scar, telemegtasis

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

SP4N LAPOR